


Vitalograph[®] micro

バイタログラフ マイクロは、センサーにニューモタコを使用した、超小型ハンディサイズのシンプル・スパイロメーターです。

外来診療時や、回診時などに、時間をかけずに喘息やCOPDの重要項目（FVC、FEV1、FEV1%、PEF）の正確な測定が可能です。

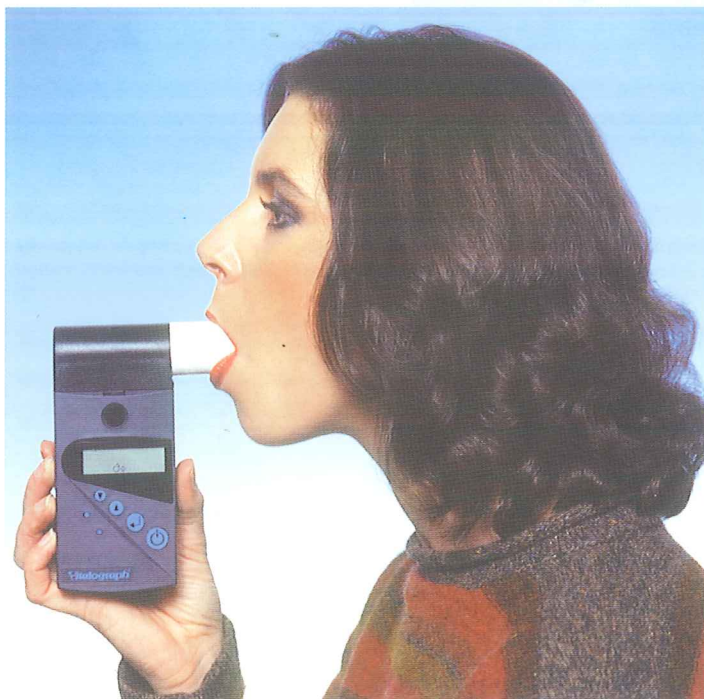

ハンディ電子スパイロメーター マイクロ

- ▼ 小型軽量（165g）
- ▼ センサーは本格的なニューモタコ
正確なデータ、頑丈、簡単消毒
- ▼ FVC、FEV1、FEV1%、PEFを、一回の最大努力呼出でシンプル測定
- ▼ 測定結果をBTPSでデジタル表示
- ▼ 簡単なキャリブレーションチェック
- ▼ 一方弁付ディスプレイマウスピース（口径22mm or 30mm）を使用すれば、感染のリスクを軽減することができます。
- ▼ アダプター（オプション）を使用すれば、感染予防用フィルター（口径22mm or 30mm）も使用可能。
- ▼ フローヘッド（センサー部分）は交換可能、オートクレーブ消毒可能。落下テスト済み
- ▼ 大きくて見やすい、高精度液晶
- ▼ ATS1994スタンダード合致



... Vitalograph[®]

ニューモタコセンサー使用小型スパイロメーター

特 徴


- ▼ ニューモタコセンサー
- ▼ 簡単操作
- ▼ キャリブレーション・チェック機能
- ▼ 測定項目 (FVC、FEV1、FEV1%、PEF)
- ▼ 大きくて見やすい液晶表示
- ▼ ローコスト・フローヘッド
- ▼ 優れた精度、再現性
- ▼ 診察室や病棟での簡易スクリーニングに
- ▼ 全てのスパイロメトリー・スタンダードに合致
- ▼ COPDや喘息の重要項目を網羅
- ▼ 暗い場所でも確実な読み取り
- ▼ 交換可能

テクニカル・スペシフィケーション


- | | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| ■測定原理 | 超小型フレイッシュニューモタコ | ■保証期間 | 購入日から1年間 |
| ■測定項目 | FVC、FEV1、FEV1%、PEF | ■電源 | PP3乾電池 (9V) |
| ■サイズ | 145mm×70mm×40mm | ■作動時間 | 400回 (通常使用条件下) |
| ■フローセンサー | ステンレス製メッシュ、ポリカーボネイト | ■オートシャットオフ | 2分間 |
| ■重量 | 165g | ■ボタン | ラバー製 |
| ■最大記録ボリューム | 9.99L | ■耐衝撃性 | 1mの落下テスト済み |
| ■最大記録フロー | 14L/S | ■保存動作温度 | 0℃～50℃ |
| ■ディスプレイ | 47mm×15mmLCD | ■測定動作温度 | 17℃～40℃ (15℃以下は基準適用外) |

●オプション

一方弁付紙製Mpc
(Safetyway[®] Mpc)

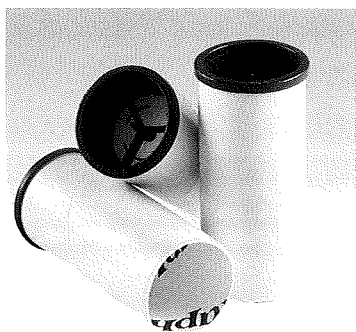

フィルター

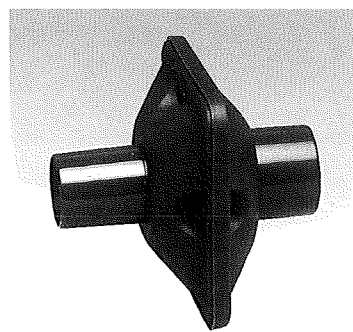

総輸入元販売元 **TAKARA 宝通商株式会社**

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-7-10

TEL : 03-3241-3121 FAX : 03-3245-0650

Email : medical@takara-online.co.jp

URL : www.takara-online.co.jp

取扱・販売店